


SwissLens

simplicity without limits

Relax

Wellness für die Augen

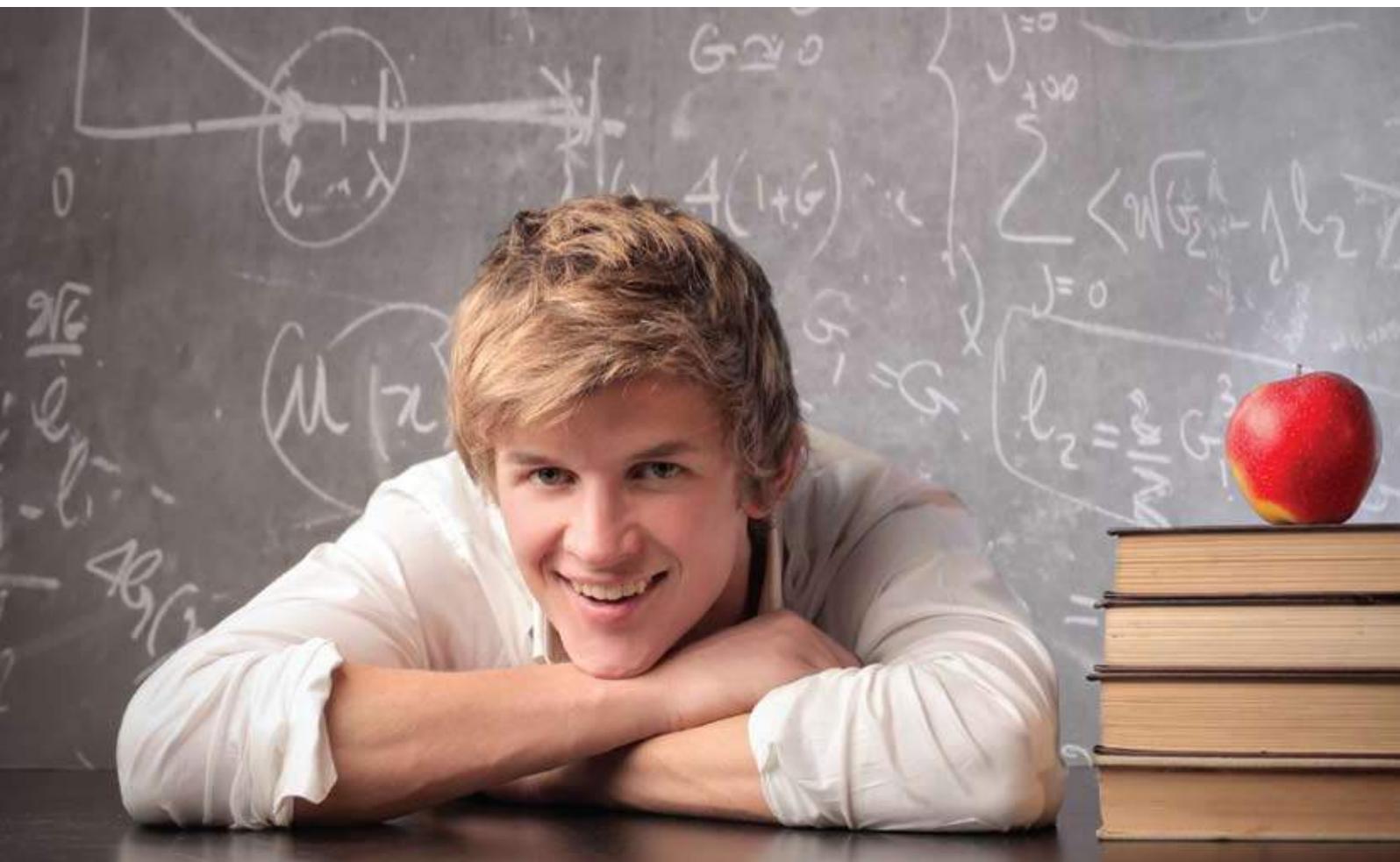

- bei fortschreitender Myopie von Kindern und jungen Erwachsenen
- zur Unterstützung der Akkommodation
- entspanntes Sehen in kürzeren Distanzen (Lesen, Schreiben, PC)
- für Schule, Studium und Freizeit
- in sphärischer und torischer Ausführung
- hohe Spontanverträglichkeit; auch in Silikonhydrogel


www.swisslens.ch

Relax

Wellness für die Augen

Mit Hilfe der Relax Kontaktlinsen werden die peripheren Abbildungsfehler einer Minuslinse korrigiert. Somit ist die optimierte Abbildung auf der ganzen Netzhaut gewährleistet und ermöglicht ein entspanntes Sehen in der Nähe.

Der Kontaktlinsenaufbau ist ähnlich dem einer Multifokallinse, wobei sich die Ferne ausschließlich im Zentrum befindet.

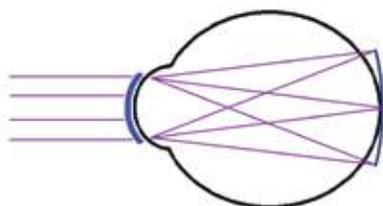

Einstärken Abbildung

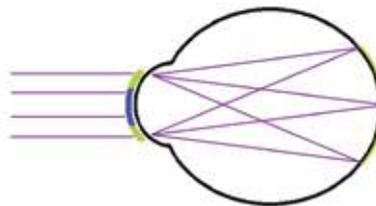


Abbildung mit Relax

Tipps zur Anpassung

- ✓ Anpassung ist identisch der einer Einstärken Kontaktlinse
- ✓ 1 - 2 Wochen Eingewöhnungszeit an neuen Seheindruck (z.B. Halos)
- ✓ Anfangs leicht verminderter Fernvisus
- ✓ Beste Resultate bei kurzsichtigen Kindern und jungen Erwachsenen

Technische Daten

Relax Orbis *Sphärische Kontaktlinse zur SehEntspannung*

Relax Toris *Torische Kontaktlinse zur SehEntspannung*

Rückfläche: sphärisch oder torisch mit einer asphärischen Abflachung

Vorderfläche: sphärisch oder torisch mit einer Polynom-Progression in der Peripherie

	min	->	max
Durchmesser	12.00	->	17.00 mm
Radius	7.00	->	12.00 mm
Sphäre	plan	->	-40.00 dpt
Zylinder	-0.25	->	-8.00 dpt
Achse	0°	->	180°
Abflachung	einkurvig -- / fließend - / markant +		
Materialien	alle laut Materialliste, inklusive Silikon Hydrogel		
Erneuerungsart	SL6 Semesterlinse, SL3 Quartalslinse		